

IPOS - Medical

EU Distributor: IPOS - HANDEL GmbH

Robert-Bosch-Str. 3 89250 Senden +49 7307 35804-33

Info@ipos-medical.de www.ipos-medical.de



(EU) 2016/425 CE 2841

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

ATEMSCHUTZMASKE FFP2

- (EN) Protective Mask FFP2
- (ES) Mascarilla de respiración FFP2
- (FR) Masques de protection respiratoire FFP2
- (IT) Mascherine di protezione FFP2
- (NL) Ademhalingsmasker FFP2
- (TR) Solunum maskesi FFP2
- (EL) Αναπνευστήρας FFP2
- (BG) Дихателна маска FFP2
- (CS) Dýchací přístroj FFP2
- (NO) Åndedrettsmaske FFP2
- (RU) Маска-респиратор FFP2
- (HU) Légzőkészülék FFP2
- (DA) Respiratormaske FFP2
- (ET) Hingamisaparaat FFP2
- (LT) Respiratoriaus kaukė FFP2
- (PL) Maska oddechowa FFP2
- (LV) Respiratora maska FFP2
- (SV) Andningsskydd FFP2
- (PT) Máscara respiratória FFP2
- (SL) Maska FFP2
- (RO) Masca respiratorie FFP2
- (SK) Respirátorová maska FFP2



IPOS - Medikal Dış Ticaret A.Ş.
Eyüp Sultan Mahallesi Yedigöller Sokak No: 14
Sancaktepe / İSTANBUL
www.iposmedikal.com.tr

MASCHERINE DI PROTEZIONE FFP2

(IT)

Utilizzi previsti

La maschera di protezione respiratoria FFP2 è un dispositivo di protezione personale (DPI) e protegge chi indossa la maschera principalmente da particelle, goccioline e aerosol e aerosol.
Serve a proteggere se stessi e gli altri filtrando l'aria quando si inspira e si espira.

Come indossare la mascherina

Seguire le indicazioni del pittogramma di queste istruzioni per l'uso e sull'imballaggio che descrivono come indossare la mascherina.

Prima dell'utilizzo

1. Assicurarsi, prima di indossare la mascherina, che le mani siano pulite. Verificare che tutti i singoli pezzi della mascherina siano intatti. La mascherina, in caso di danni, non potrà essere utilizzata ma dovrà essere immediatamente smaltita.

2. Prima di indossare la mascherina lavarsi a fondo le mani.

3. Aprire la mascherina in modo tale che assuma la forma di un guscio.

4. Posizionare la mascherina nell'area bocca-naso e adattare il supporto nasale alla forma del naso.

5. Con l'altra mano mettere gli elastici sopra entrambe le orecchie.

6. Prima dell'utilizzo controllarne l'esatta posizione effettuando una verifica nel modo seguente:
- Coprire la mascherina con le due mani senza modificarne la posizione.
- Espirare con forza. Se intorno al naso fuoriesce dell'aria occorrerà adattare la forma del supporto nasale con le modalità sopra descritte.
- Se fuoriesce dall'aria dai contorni della mascherina occorrerà correggere la posizione degli elastici per le orecchie. Qualora la mascherina non sia posizionata correttamente evitare di entrare nell'area di pericolo.

Avvisi e limitazione

- L'utente dovrebbe familiarizzare con il respiratore prima dell'uso e seguire le istruzioni per l'uso.
- La filtrazione del respiratore dipende dall'atmosfera ambientale. È destinata al monouso in aree adeguatamente ventilate. Non utilizzare la mascherina in un'atmosfera esplosiva.
- Prima dell'utilizzo verificare che la mascherina non abbia subito danni.
- I peli del viso sotto il bordo di tenuta possono causare delle perdite.
- La maschera non deve essere schiacciata o deformata.
- Non lavare.
- Non mettere un asciugamano, un fazzoletto, ecc. all'interno della maschera.
- Non utilizzare se la maschera è contaminata.
- Non toccare la superficie della maschera dopo averla indossata.
- Smaltire la mascherina al termine di un turno. Il corpo della mascherina non dovrebbe essere toccato con le mani. Le mani, dopo avere tolto la mascherina, dovrebbero essere lavate.
- **GLI AVVISI QUA CONTENUTI SONO VALIDI PER TUTTO IL PERIODO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA. IL LORO MANCATO RISPETTO PUÒ ESSERE CAUSA DI MALATTIE E DANNI ALLA SALUTE**

Autorizzazioni

Questo prodotto è autorizzato ai sensi della
DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR.

EU-Konformitätserklärung



IPOS-Modul C2



IPOS-CE-Zertifikat



ISO 9001 TÜV-Süd



ISO 13485



(IT) Prodotto monouso



(IT) Si prega di osservare le istruzioni per l'uso all'interno



(IT) Avvisi e limitazioni



(IT) Conservare al pulito e all'asciutto



(IT) Intervallo di temperatura



(IT) Data di scadenza



(IT) Data di fabbricazione



(IT) Indirizzo del produttore

La dichiarazione di conformità UE è reperibile all'indirizzo web:

www.futunatura.it/ipos-medical
Il nome, l'indirizzo, il numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella determinazione del rispetto del Regolamento sui dispositivi di protezione individuale: MNA Laboratuvarları San. Tic.Ltd.Şti, Küçükbakkalköy Mahallesi, Yenidoğan Caddesi No:21 Ataşehir / İstanbul - Turkey (2841)

Le mascherine sono conformi al Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e alla norma EN 149:2001 + A1:2009.